



uživatelský návod (český jazyk)

polohovací křesla

PREMIUM – MONTMARTRE – ELYSEE – ELYSEE E



verze 9/2018



1. **VŠEOBECNÉ INFORMACE** -----str. 4-6

- A) Pomoc a přístupnost -----str. 5
- B) Bezpečnostní pokyny ----- str. 5-6

2. **PODMÍNKY POUŽITÍ** ----- str. 7-10

- A) Oblast použití ----- str. 8
- B) Jak se dostat do a z křesla ----- str. 8
- C) Přenos polohovacího křesla -----str. 9
- D) Ovládání polohovacího křesla obsluhou -----str. 9
- E) Přesun ve svahu -----str. 9
- F) Životnost -----str. 10

3. **POPIS VÝROBKU** -----str. 10-15

- A) Opěrka hlavy ----- str. 10
- B) Pásy -----str. 10-11
- C) Rukojeť pro ovládání doprovodnou osobou -----str. 11
- D) Křeslo (sedací část) -----str. 11-12
- E) Sedací polštář Visco Clasee II -----str. 12
- F) Pvlak ----- str. 12
- G) Přední a zadní kolečka ----- str. 13-14
- H) Podnožka -----str. 14
- I) Stupačka -----str. 14
- J) Stolky -----str. 15
- K) Podpora těla -----str. 15
- L) Nosnost -----str. 15
- M) Umístění identifikačního štítku -----str. 15

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE -----str. 16-17

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ -----str. 17-18

A) Pravidelná údržba -----str. 17

B) Čištění -----str. 17

C) Recyklace -----str. 18

6. ZÁRUKA -----str. 18-19

Před použitím si, prosím, tento uživatelský návod pečlivě přečtěte.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto polohovacího křesla.

Naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny ve Francii v souladu s požadavky na kvalitu a bezpečnost. Před použitím křesla si prosím z bezpečnostních důvodů pečlivě přečtěte tento uživatelský návod, který si uschovejte.

V tomto návodu naleznete informace o nejnovějších typech polohovacích křesel. Společnost INNOV'SA si však ponechává právo provádět další inovace bez povinnosti přizpůsobit nebo nahradit dříve dodané výrobky (starší typy).

Polohovací křeslo je určeno pro osoby s poruchou vnímání okolí (dezorientované) a s problémy chůze. Je určena k přepravě pouze jedné osoby. Polohovací křeslo smí být použito uvnitř budovy i mimo ni pouze za určitých podmínek.

Polohovací křeslo je třeba používat za přítomnosti a bdělosti další osoby. Používá-li křeslo dezorientovaná či rozrušená osoba je dohled další osoby nezbytný.

Polohovací křeslo musí být používáno pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kola současně dotýkají země a mají dostatečný kontakt pro rovnoměrné otáčení všech kol.

Polohovací křeslo používejte pouze na rovných a pevných plochách. Nepoužívejte jej na zemi pokryté šterkem, blátem, dlažebními kostkami, na trávě nebo na jiném nestabilním/nerovném povrchu.

Na polohovací křeslo nestoupejte (nepoužívejte jako žebřík), nepřenášejte na křesle těžké či horké předměty.

Koberce či jiné podlahové krytiny mohou být používáním polohovacího křesla poničeny. Používejte pouze originální příslušenství společnosti INNOV'SA.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním údržby či jejího nedostatku, nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto uživatelském návodu.

Dodržení pokynů pro správné a bezpečné používání a dodržení vhodné údržby je základním předpokladem záruky.

Typ PREMIUM a MONTMARTRE jsou zdravotnické prostředky třídy A.

Typ Elysee a Elysee E jsou zdravotnické prostředky třídy B.

Pro více informací, kontaktujte, prosím, svého prodejce.

A) Pomoc a přístupnost



Osoby, které mají problém s přečtením tohoto návodu, mají tyto možnosti:

- originální uživatelský návod je k dispozici na webových stránkách www.innov-sa.com, kde lze velikost dokumentu upravit podle potřeby
- kontaktovat svého prodejce pro ústní prezentaci návodu k obsluze

B) Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní a provozní pokyny pro používání polohovacího křesla musí být pečlivě přečteny uživatelem a případným ošetřovatelem. Tento návod upozorňuje na postupy a nezbytné techniky, které zajišťují správné využití výrobku. Je důležité zkusit tyto techniky, dokud se necítíte dobře při používání výrobku a při provádění nejčastěji požadovaných pokynů pro údržbu. Používejte tuto příručku jako základní příručku, ve které jsou prezentovány mnohé úspěšně testované techniky. INNOV'SA povzbuzuje každého uživatele a každou obsluhu, aby vyzkoušeli co je pro ně nejlepší v konkrétním prostředí. Přesto je nutné dodržovat všechna doporučení tohoto manuálu. Popsané techniky v této příručce jsou výchozím bodem pro uživatele a obsluhu, přičemž bezpečnost je nejdůležitější téma. Při použití dezorientovanou nebo rozrušenou osobou je dohled nadále nezbytný.

Společnost INNOV'SA nedoporučuje používat polohovací křeslo jako výcvikové zařízení. Pro tento účel křesla nebyla vyvíjena a testována. V případě použití polohovacího křesla k výcviku společnost INNOV'SA není zodpovědná za případné poranění a na případné poškození se

záruka nevztahuje. Při používání polohovacího křesla musí být všechna čtyři kola v kontaktu se zemí, s výjimkou případů kdy se překonává překážka.

Tento návod k obsluze je určen pro uživatele a distributora.



Nikdy nenechávejte uživatele bez dozoru.

Symbole uvedené v tomto návodu



Varování

Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit vážná zranění, která by mohla být dokonce smrtící.



Důležité

Označuje nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může mít za následek drobná zranění nebo materiální škody.



Výrobek nebyl navrhnut jako sedadlo pro motorová vozidla.

2. PODMÍNKY POUŽITÍ

! Vždy při přesunu polohovacího křesla pomocí rukojeti musí obsluha držet křeslo mírně zakloněné, aby se stupačka nedotýkala země.



Polohovací křesla nebyla navržena a vyrobena jako sedadla pro motorová vozidla.

Ergonomický tvar křesla a jeho rozmanité příslušenství umožňují využívat polohovací křesla v jejich plném rozsahu osobami, které mají následující omezení:

- ochrnutí
- slabost/malformaci kloubů
- léze kloubů
- onemocnění jako je srdeční selhání a snížení oběhu, poruchy rovnováhy nebo kachexie a klinické geriatrické příznaky

Pokud jde o kontraindikace, je potřeba zvážit následující faktory:

- hmotnost nad 130 kg
- fyzický a psychologický stav
- nevhodné prostředí

Jako náhradní díly pro polohovací křesla se smí použít pouze originální náhradní díly.

Polohovací křeslo s rámovou konstrukcí je určeno pro osoby, které ztratily svalovou sílu. Proto by při užívání polohovacího křesla tyto osoby měly být obzvláště opatrné. Je velmi důležité zvolit model, který je nejvíce přizpůsoben velikosti těla uživatele.

Před použitím polohovacího křesla se přesvědčte, zda brzdy a zvedák správně fungují, a také zkontrolujte bezpečnost pás, je-li správně a dostatečně utažen a upevněn.

Pokud si uživatel sedá či se zvedá z polohovacího křesla (s či bez pomoci), bez ohledu na to jaký způsob se použije, je nutné mít kolečka zabrzděna, opěrku noh vertikálně sklopenou a podnožku rovnoměrně položenou na zemi, aby nedošlo k převrácení křesla.

Jakmile uživatel sedí v polohovacím křesle, musí být připoután pomocí bezpečnostního pásu, který se nastaví tak, aby uživatel nemohl z pod pásu vyklouznout. Jakmile je uživatel připoután pomocí bezpečnostního pásu, polohovací křeslo nakloňte dozadu, tím přispějete k zabránění vyklouznutí uživatele z pod pásu.

Jakmile je pacient usazen, polohovací křeslo musí mít kolečka zabrzděna, musí být umístěna na rovné ploše a po každém přesunu, musí být kolečka zabrzděna.

A) OBLAST POUŽITÍ

Polohovací křeslo smí být používáno pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kolečka současně dotýkají země po celou dobu jeho používání (ať už se křeslo přesouvá nebo ne), aby se kolečka mohla pohybovat rovnoměrně.

Pokud se polohovací křeslo používá na nerovném povrchu (dlažební kostky, svah, povrch s překážkami – např. obrubník,...), doporučujeme, aby křeslo ovládala vyškolená osoba.

Na polohovací křeslo nestoupejte (nepoužívejte jako žebřík), nepřenášejte na křesle těžké či horké předměty.

Koberce či jiné podlahové krytiny mohou být používáním polohovacího křesla poničeny.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním údržby či jejího nedostatku, nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto uživatelském návodu.

Dodržování pokynů ke správnému užití, obsluze a údržbě je základním předpokladem uznání záruky.

Polohovací křeslo se používá při maximální teplotě 40°C a v suchém prostředí, aby nedošlo ke korozi. Pokud by křeslo bylo v kontaktu s vodou, měkkým hadříkem jej utřete do sucha.

B) JAK SE DOSTAT DO A Z KŘESLA



Nejste-li schopni sami přesunu, požádejte o pomoc.

1. Umístěte polohovací křeslo co nejbližší k židli, pohovce nebo posteli, do které se chcete přemístit.
2. Ujistěte se, že jsou kolečka zabrzděna.
3. Uvolněte pákou podnožku, tak aby se spodní část podnožky dotkla země.
4. Přemístěte se z či na polohovací křeslo.

C) PŘENOS POLOHOVACÍHO KŘESLA

Nejlepší způsob, jak přesunout polohovací křeslo, je jej tlačit před sebou. Pokud to tak nelze, musí se rám křesla pevně uchopit v přední i zadní části – tímto způsobem lze polohovací křeslo bezpečně přenést. Nezvedejte křeslo za opěrku ruk či stupačku. Pro přenášení křesla jsou zapotřebí minimálně dvě osoby.

Při přenosu polohovacího křesla musí být dodrženy následující pokyny:



- přenos polohovacího křesla, když na něm sedí uživatel, je zcela zakázán;
- křeslo umístěte do vodorovné polohy pomocí příslušné páky a odstraňte stupačku;
- minimálně dvě osoby nyní mohou přenést křeslo;
- nikdy nezvedejte křeslo za kolečka, spíše pevně uchopte rám v přední i zadní části křesla nebo na boku pod opěrkami;
- k přesunu křesla přes schody/schodiště jsou zapotřební dvě osoby; polohování křesla je během přesunu zakázáno;
- žádná osoba ani žádný předmět by během přepravy neměl zůstat pod polohovacím křeslem; možnost zranění či poškození.

D) OVLÁDÁNÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA OBSLUHOU



- * buďte opatrní, pokud se pohybujete v horkém či chladném prostředí (sluneční svit, extrémní chlad, sauny apod.), hrozí riziko zranění (např. popálenin)
- * pokud v tomto prostředí zůstanete určitou dobu, jednotlivé součásti polohovacího křesla mohou odrážet okolní teplotu
- * k přesunu polohovacího křesla musí obsluha použít rukojeť

E) PŘESUN VE SVAHU

Na svahu musí obsluha dbát zvýšené pozornosti a přizpůsobit rychlost a způsob přesunu. Doporučujeme se přesouvat na svazích co nejpomaleji.



- * berte v úvahu sílu obsluhy - pokud si nejste jisti, že obsluha je dostatečně silná a jistá v ovládání polohovacího křesla, použijte brzdy
- * pokud je polohovací křeslo vybaveno bezpečnostním pásem, použijte jej
- * nesnažte se zdolat ostrý sklon povrchu

F) ŽIVOTNOST

Očekávaná životnost tohoto výrobku je pět let, pokud bude křeslo používáno denně a v souladu s bezpečnostními pokyny, periodickou údržbou a vhodným používáním, jak je uvedeno v tomto návodu. Skutečná životnost závisí na frekvenci a intenzitě používání.

3. POPIS VÝROBKU

A) OPĚRKA HLAVY

* Opěrka hlavy je odnímatelná a její výšku lze nastavit.

B) BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

* standardní pás

* 4bodový pás

Standardní pás

Polohovací křeslo je vybaveno pásem s nastavitelnými a odnímatelnými popruhy. Použití standardního (břišního) pásu zajišťuje lepší polohování v případě svalových slabostí, které vedou k špatnému držení těla a nabízí dodatečnou bezpečnost proti riziku pádu.

Montáž standardního pásu:

Umístěte a upevněte standardní pás před dolní část pacienta. Utáhněte pás tak, aby uživatel nemohl sklouznout pod pásem a ublížit si.



Standardní pás musí být dostatečně utažen. Správné nastavení a ostražitost další osoby (doprovodu) je nutná. Standardní pás je vyměnitelný. Při každém použití je důležité zkontrolovat, zda je pás správně ukotven a upevněn.

4bodový pás

Za žádných okolností nemohou být pásy považovány za zádržné zařízení, a proto je nutné, aby uzamykací a odemykací uzávěry zůstaly přístupné uživateli. Pásy zajišťují lepší polohování v případě svalové slabosti, která vede ke špatnému držení těla a nabízí dodatečnou bezpečnost proti možnému pádu.



4bodový pás musí být dostatečně utažen. Jeho správné nastavení a ostražitost další osoby (doprovodu) je nutná. Standardní pás je vyměnitelný. Při každém použití je důležité zkontrolovat, zda je pás správně ukotven a upevněn.

C) RUKOJEŤ pro ovládání doprovodnou osobou

Rukojeť umístěná na zadní straně křesla umožňuje doprovodné osobě (obsluze) pohybovat s křeslem a řídit ho.



D) KŘESLO (sedací část)

Typ MONTMARTRE A ELYSEE

Polohování křesla pomocí hydrauliky.

Nastavení sklonu křesla

K nastavení sklonu křesla použijte ovládání, které je umístěno na zadní části opěradla.



Tento úkon musí provádět pouze osobní ošetřovatel (obsluha).

Typ PREMIUM

Nastavení sklonu křesla

K nastavení sklonu křesla, použijte, prosím, dálkový ovladač.



*první dvě tlačítka umožňují aktivovat elektrickou funkci sklonu - dopředu/dozadu :

bílé tlačítko – dopředu

zelené tlačítko - dozadu

* modré tlačítko aktivuje program REST (odpočinek), který automaticky upravuje sklon vašeho sedadla, aby se vyrovnalo napětí a snížilo riziko dlouhodobého tlaku (mírné kolísání - 35mn program)

* žluté tlačítko aktivuje vibrační polštář MASSAGE

(cyklus po 5 minutách)

Typ ELYSEE E

Nastavení sklonu křesla

K nastavení sklonu křesla, použijte prosím dálkový ovladač.



*první dvě tlačítka umožňují aktivovat elektrickou funkci sklonu -
dopředu/dozadu :

bílé tlačítko - dopředu

zelené tlačítko - dozadu

Uzamknutí dálkového ovládání

Zelené a bílé tlačítko držte po dobu deseti (10) sekund – dálkový ovladač je uzamčen/odemčen.



Když připojíte polohovací křeslo do zásuvky, nepoužívejte dálkový ovladač po dobu 60 minut.

Nicméně pokud by došlo k výpadku proudu, přepněte dálkový ovladač do režimu "zabezpečení" (ovladač bude uzamknut); restartujte dálkový ovladač úplným sklopením křesla: a) sklopte křeslo úplně dopředu a poté hned úplně dozadu, nebo b) odpojte křeslo ze zásuvky po dobu 60 sekund.

Nyní je vaše dálkové ovládání restartováno.

E) SEDACÍ POLŠTÁŘ VISCO CLASSE II

Tento sedací polštář je vyroben z paměťové (viskoelastické) pěny s vysokou hustotou.

F) POVLAČ

Povlak sedáku je odnímatelný a dá se prát v pračce při teplotě 30°C. Doporučujeme prát povlak ve vaku na praní, aby povlak vydržel jako nový co nejdéle.

G) PŘEDNÍ A ZADNÍ KOLEČKA

Typ MORTMARTRE a PREMIUM

Čtyři kolečka o průměru 100 mm.

- * Před použitím vždy zkontrolujte, zda kolečka nejsou znečištěna.
- * Před použitím zkontrolujte, zda kolečka nejsou opotřebovaná. Bude-li to nutné, vyměňte je.



Při překonávání překážky NESMÍ BÝT její výška vyšší než poloměr koleček. Je-li překážka vyšší než poloměr kolečka, křeslo musí být přes překážku přeneseno.

Brzdy

- * kolečka zabrzdíte stlačením pojistky, umístěné na kolečku
- * kolečka odbrzdíte zdvižením pojistky, umístěné na kolečku
- * Tyto brzdy nejsou určeny ke zpomalování (zastavení) polohovacího křesla.
- * Zkontrolujte, zda při pohybu křesla se brzdy nedotýkají koleček (případně nejsou-li zabrzděna).

Typ ELYSEE a ELYSEE E

- * rozměr předního kolečka je 200 mm
- * rozměr zadního kolečka je 300 mm




- * Před použitím vždy zkontrolujte, zda kolečka nejsou znečištěna.
- * Před použitím zkontrolujte, zda kolečka nejsou opotřebovaná. Bude-li to nutné, vyměňte je.



Při překonávání překážky NESMÍ BÝT její výška vyšší než poloměr koleček. Je-li překážka vyšší než poloměr kolečka, křeslo musí být přes překážku přeneseno.

Brzdy

- * kolečka zabrzdíte stlačením pojistky (obr. A)
- * kolečka odbrzdíte zdvižením pojistky (obr. B)

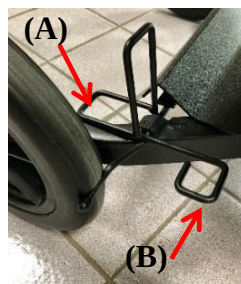

- * Tyto brzdy nejsou určeny ke zpomalování (zastavení) polohovacího křesla.
- * Zkontrolujte, zda při pohybu křesla nejsou brzdy v kontaktu s kolečky.

H) PODNOŽKA

Úhel podnožky je nastavitelný.

typ Elysee a Montmartre**Nastavení podnožky**

- * Podnožka má 6 různých poloh nastavení, nezávisle na sklonu křesla.
- * Nastavení podnožky může provádět pouze obsluha.

typ Premium a Elysee E**Nastavení podnožky**


- * Úhel nastavení podnožky je závislý na sklopení křesla a je taktéž prováděn dálkovým ovladačem.

I) STUPAČKA

Stupačka je sklopná, odnímatelná a má nastavitelnou výšku.

Nastavení stupačky

- * otočte knoflíkem (obr. C), aby bylo možné nastavit výšku stupačky
- * otočte knoflíkem (obr. D), abyste sklopili stupačku pod křeslo
- * **vždy se ujistěte, že při polohování křesla do svislé (základní) polohy pod podnožkou nebylo nic zanecháno - nebezpečí poškození**
- * **vždy se ujistěte, že stupačka se rovnoměrně dotýká země**
- * **nestoupejte ani nepřenášejte hmotnost na podnožku, pokud se stupačka rovnoměrně nedotýká země**
- * **než se posadíte či než se z křesla zvednete, vždy zkontrolujte, zda se stupačka rovnoměrně dotýká země**
- * **stupačka je bezpečnostní prvek a proto nesmí být odstraněna**

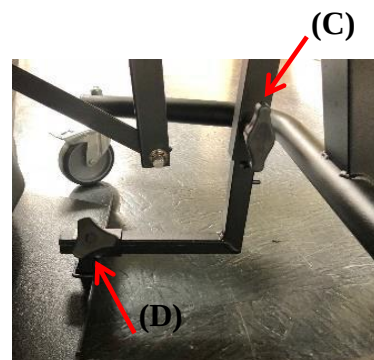


J) STOLKY

Typ Elysee, Elysee E a Montmartre

Vertikální, odklopný stolek (obr. E)

- vložte vertikální, odklopný stolek do trubky rámu
- utáhněte knoflík

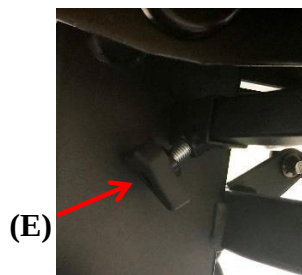

Typ Premium

Boční stolek (obr. F)

- vložte držák stolku do otvorů k tomu určených.



K) PODPORA TĚLA

- * upevněte boční část rámu k rukojeti (obr. G)
- * vložte opěrku/-y těla do trubky určeného k tomuto účelu
- * utáhněte knoflík (obr. H)



L) NOSNOST

Maximální hmotnost uživatele udaná výrobcem nesmí přesáhnout **130 kg**.

M) UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU

Identifikační štítek je umístěn na zadní straně polohovacího křesla (obr. CH)



4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výrobní číslo je uvedeno na identifikačním štítku umístěném na zadní straně dolního rámu.

max. hmotnost uživatele	130 kg
hloubka sedáku	46 cm – 48 cm – 50 cm
šíře sedáku	32 cm, 38 cm, 44 cm, 50 cm a 56 cm
rozměr předních/zadních koleček u typu Elysee a Elysee E	2 přední kolečka 20 cm/2 zadní kolečka 30 cm
rozměr předních/zadních koleček u typu Premium a Montmartre	4 kolečka s brzdami, poloměr 100 mm
brzdy	manuální
podnožka	nastavitelný úhel
stupačka	nastavitelný a odnímatelný
potahy	PVC/PU ¹ : Cocoa (kakaová), Ebony (ebenová), Lemon-Yellow (citronově žlutá) a Raspberry pink (malinově růžová) Polyester ² : Choco Ed (čokoládová edice), Black Ed (černá edice) a šedá tkanina
prošívaný povlak	silikonová dutá vlákna
rám	nerezová ocel
barva rámu	černá
hmotnost polohovacího křesla	přibližně 35 kg v závislosti na velikosti
celková délka	100 až 110 cm v závislosti na velikosti
délka při náklonu	145 až 157 cm v závislosti na velikosti
celková šířka	65 až 77 cm v závislosti na velikosti
celková výška	125 cm
výška od podlahy k loketní opěrce	65 cm
výška od podlahy k sedáku	45 cm
max. úhel sklonu	30°

¹ v souladu s normami 2021-2 – protokol o zkoušce č. 367160735

² v souladu s normami 1021-2 – protokol o zkoušce č. 1802686.01

Údaje podle typu polohovacího křesla	Jednotky	Min.	Max.
celková výška, vč. stupačky	mm	900	1350
celková šířka	mm	640	760
délka složeného polohovacího křesla	mm	710	900
šířka složeného polohovacího křesla	mm	640	760
výška složeného polohovacího křesla	mm	1320	1320
celková hmotnost	kg	28	43
hmotnost nejtěžší části	kg	12	22
úhel sedu	stupně	0	30
hloubka sedu	mm	460	500
šířka sedu	mm	320	560
výška sedu	mm	450	450
úhel zadního sedu	stupně	95	95
výška zadního sedu	mm	870	870
vzdálenost mezi stupačkou a sedákem	mm	450	450
úhel noh při sezení	stupně	20	90
vzdálenost mezi opěrkami ruk a sedákem	mm	170	170
vzdálenost mezi opěrkami ruk a zadní částí sedáku	mm	400	400
průměr madla	mm	20	20
horizontální umístění nápravy kol	mm	125	140
poloměr otáčení	mm	355	900

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Očekávaná životnost polohovacího křesla závisí na používání, skladování, pravidelné údržbě a čištění.

A) PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Aby bylo Vaše polohovací křeslo INNOV'SA stále v dobrém stavu, musíte provádět pravidelnou údržbu podle následujících pokynů:

- * kolečka pravidelně kontrolujte a čistěte, v případě potřeby je vyměňte
- * kontrolujte upevnění šroubů, rukojetí a tlačítek nastavování
- * kontrolujte brzdy
- * zkontrolujte sedák (jestli je čistý, nemá žádné trhliny, či zda není poškozena konstrukce apod.) a vyčistěte jej; v případě potřeby vyměňte potah

B) ČIŠTĚNÍ

K čištění plastových částí polohovacího křesla použijte vhodný čisticí prostředek. Pečlivě si přečtěte informace uvedené na obalu čisticích prostředků, které použijete. Výhradně používejte pouze mycí houbu nebo měkký kartáč. Plastové části jsou například brzdy, stupačka apod.

C) RECYKLACE



Likvidace a recyklace musí být prováděny v souladu s platnými pravidly a legislativou platnou v dané zemi. Všechny elektrické části musí být odstraněny a recyklovány jako elektrické součástky. Plastové díly musí být zpracovány ve spalovnách nebo recyklovány. Kovové části a kola musí být likvidovány jako kovový odpad.

6. ZÁRUKA

Podmínky záruky

Dvouletá záruka na polohovací křesla, která začíná běžet ode dne dodávky, se vztahuje na konstrukční vady materiálu či výrobního charakteru. Dnem dodání se myslí den zakoupení, který musí být napsán na záruční list uvedený v tomto návodu.

Opravy či výměny vadných dílů, které po rozhodnutí společnosti INNOV'SA spadají pod záruku, jsou zdarma. Tímto zdůrazňujeme, že opravy či výměny vadných dílů budou provedeny pouze s novými náhradními díly po posouzení společností INNOV'SA.

Společnost INNOV'SA odmítá jakoukoli odpovědnost a záruku za jakékoliv škody způsobené neodpovídající, nesprávnou nebo nevyhovující montáží a/nebo opravami, nedbalostí a opotřebením, jakož i neoprávněnými změnami dílů či prvků prováděných uživatelem či třetí stranou. V těchto případech za případné škody apod. výrobce neodpovídá.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení povlaků, koleček, trubek (hlavně gumové části) apod. Na poškození způsobené nadměrnou silou nebo nevhodným užíváním se záruka nevztahuje. Jsou-li polohovací křesla užívána osobou, která váží více než je maximální nosnost křesla, na případné poškození se záruka taktéž nevztahuje. Záruka je platná pouze v případě, že veškeré pokyny popsány v tomto návodu jsou dodrženy.

ZÁRUČNÍ LIST

křestní jméno : _____

příjmení : _____

adresa : _____

PSČ : _____

obec : _____

datum nákupu : _____

Chcete-li uplatnit záruku, datum záruky musí být uvedeno.

typ výrobku : _____

výrobní číslo : _____

razítko prodejce:

Děkujeme za respektování životního prostředí. Tento výrobek a jeho obaly podléhají selektivnímu třídění odpadu. Výrobek a obaly na konci životnosti by měly být recyklovány v autorizovaném sběrném zařízení. Odstraňováním odpadu přispějete k ochraně životního prostředí.

Společnost INNOV'SA se neustále snaží zlepšovat kvalitu našich služeb a výrobků. Máte-li nějaké postřehy, které by nám pomohly se zlepšovat, rádi je uvítáme.

Pozn.:

INNOV'SA

7 avenue Bernard Pleds F-10110 BAR-SUR-SEINE – FRANCE

Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12

www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com