

## ÚDRŽBA – BEZPEČNOST

Pro zajištění dobrého výkonu a bezpečnosti byste měli pravidelně kontrolovat, zda jsou splněny následující podmínky:


- K čištění prachu a nečistot použijte měkký navlhčený hadřík. K odstranění tvrdých skvrn použijte mýdlo a vodu. Osušte měkkým hadříkem. Při dezinfekci v nemocničním prostředí postupujte podle doporučení odborníka na hygienu.
- Zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby správně utaženy.
- Pokud vaše chodítko dokonale nefunguje - okamžitě kontaktujte svého prodejce.
- Nikdy nepoužívejte chodítko se závadou. Nepokoušejte se o opravy sami!
- Životnost produktu je 5 let.

POZN. Pouze pro podporu chůze. Max. hmotnost: P402, P408 100 kg a P421B je 120 kg. **INVACARE** nepřijímá odpovědnost za úpravy, vadné opravy atd., které jsou mimo jeho kontrolu.

POKYNY PRO ZNIČENÍ VÝROBKU A BALENÍ: Pokud produkt již nelze používat, je nutné výrobek a jeho příslušenství i obalový materiál správně roztrždit.

Všechny důležité technické informace jsou uvedeny na štítku P402, P408 a P421B.

- 1: Jméno výrobce
- 2: Číslo výrobku
- 3: Název výrobku
- 4: Rok výroby
- 5: Měsíc výroby
- 6: Max. váha uživatele

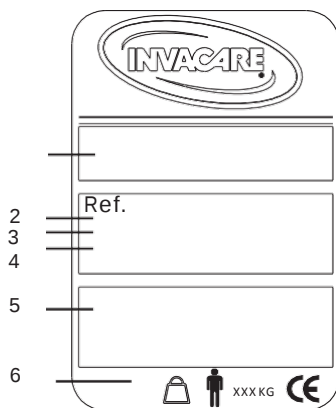

P402: 48 cm  
P408: 58 cm  
P421B: 62 cm

P402: 77-95 cm  
P408: 78,5-88,5 cm  
P421B: 79-92 cm




Výrobce:  
INVACARE REA AB, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, Sweden  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99  
Prodejce:  
Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed, UK-Bridgend CF35 5HZ  
TEL (44) (0)1656 776 200, FAX (44) (0)1656 776 201  
[UK@invacare.com](mailto:UK@invacare.com), [eire@invacare.com](mailto:eire@invacare.com)




## P402 AVENTIA, P408 MAESTRIA, P421B FORIA


P402 Aventura

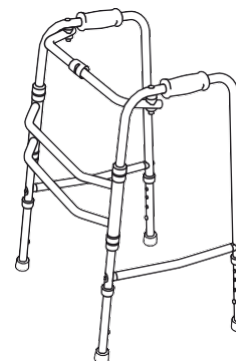

P408 Maestria

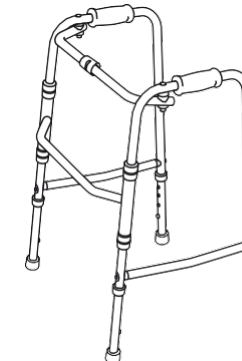

P421B Foria

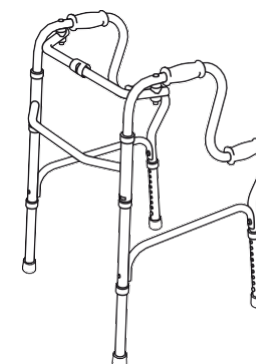

### NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Chodítko je přizpůsobeno pro vnitřní i venkovní použití.

### ÚČEL POUŽITÍ

Chodítko je určeno pouze pro použití jako pomoc při chůzi; jakékoli jiné použití může znamenat riziko zranění.

### Pozn.!

Obsah tohoto návodu k obsluze musí být sdělen uživateli před předáním výrobku.

Předepisující lékař musí zajistit, aby měl uživatel dostatečné intelektuální a fyzické schopnosti používat chodítko.



CZ NÁVOD K OBSLUZE

1534946-2100419



## BEZPEČNOST

- Před použitím zkontrolujte, zda byl výrobek dodán v perfektním stavu
- Při použití jako podpěry pro chůzi musí být chodítko zcela rozloženo. Pozn. Použití pouze pro podporu chůze.
- Pozn.! Nesedějte na horní trubku.
- Pozn.! Nepoužívejte příčku jako podpěru.
- Při chůzi po svazích buďte opatrní.
- Nepoužívejte na schodech.
- Nepoužívejte na eskalátorech.
- Nepřekračujte maximální hmotnost uživatele uvedenou na štítku výrobku.
- Opotřebené, poškozené nebo chybějící díly musí být okamžitě vyměněny kvalifikovaným technikem.
- Nenechávejte ani neskladujte chodící podporu venku.
- Kontrolujte stabilitu chodítka v pravidelných intervalech a pokud je to nutné, zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby pevně utaženy a že železné části jsou v dobrém stavu.
- Chůzi na mokřem nebo kluzkém povrchu věnujte velkou pozornost.

## NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Zatlačte odpružený zajišťovací kolík, dokud se noha neuvolní. Upravte nohu na požadovanou délku a zkontrolujte, zda blokovací kolík vyčnívá ven. Všechny nohy musí mít stejnou délku.



## PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte veškerý obal.

## ROZKLÁDÁNÍ

Rozložte bočnice až se ozve zřetelné cvaknutí. Před použitím podpěry se ujistěte, že není možné složit boční rámy.

## SKLÁDÁNÍ

Stiskněte zajišťovací kolík uprostřed horní trubky a sklopte boční rámy.

## POZNÁMKA!

 Neodjišťujte zajišťovací kolík, pokud nezamýšlíte sklopit chodítko.

## POZNÁMKA!

 Pozn! Uvědomte si nebezpečí rozdrčení mezi částmi rámu.

