


obr. 1



obr. č. 2

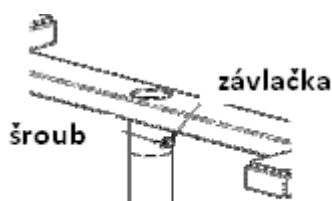

obr. č. 3

Návod k použití POLE 1100 – rozpěrné madlo

POZNÁMKA: rozpěrné madlo POLE je určeno pro výšku stropu 2,10 – 3 m.

Ještě předtím, než začnete s montáží, změřte si pečlivě výšku stropu tam, kde chcete mít madlo umístěno.

1. Vyjměte všechny díly z obalu a položte je na rovný povrch, jak je znázorněno na obr. 1.
2. Pokud je váš strop 2,10 m vysoký, nepoužívejte nástavec (č. 2). Upevněte vrchní nástavec (č. 1) přímo na nástavec (č. 3), ve kterém otvory č. 1 a č. 3 nasadíme na sebe a šroub (č. 6) zasuneme. Po zasunutí šroubu vložte závlačku (č. 7) skrz otvor ve šroubu a ohněte konec závlačky tak jak je znázorněno na obr. 2.

3. Pokud je výška vašeho stropu 2,40 až 3,00 m, připojte vrchní nástavec (č.1) na nástavec (č.2), ve kterém nastavte otvory tak, abyste protáhli šroub. Poté zajistěte závlačkou, jak je znázorněno na obr. č. 2.

4. Jak je znázorněno na obr. 1, nástavec (č.2) má dva otvory, které jsou označeny "A" popř. "B". Otvor „A“ je určen pro výšku stropu od 2,40 m. Otvor „B“ je určen pro výšku stropu od 2,70 do 3,00 m.

5. Upevněte prodlužující nástavec (č.2) na nástavec (č.3), ve kterém se otvory označené „A“ nebo „B“ nástavce (č.2) nasadí na odpovídající otvory nástavce (č.3). Poté zajistěte dle popisu v článku 2.

6. Nasadte nástavec (č.5) na nástavec (č.4), jak je znázorněno na obr.č.1, ve kterém zářez nástavce (č.4) nasadíte na vnitřní čep nástavce (č.5) tak, aby se zabránilo protáčení nástavce (č.5) a (č.4) (viz. obr. 3)


7. Zasuňte závit nástavce (č.3) do nástavce (č.4) a umístěte rozpěrné madlo „Pole“ na požadované místo tak, aby se nástavec (č.5) nacházel na zemi a nástavec (č.1) na stropu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda se distanční podložka (č.11) z umělé hmoty nachází mezi regulační maticí (č.8) a podložkou (č.9) jak je znázorněno na obr. č. 1 dříve, než spojíte nástavce (č.3 a č.4)

Pro zajištění rozpěrného madla mezi podlahou a stropem otáčejte regulační maticí (č.8) pomocí klíče (obsah balení) ve směru hodinových ručiček. Utáhněte řádně regulační matici, aby bylo madlo pevně uchyceno.

POZNÁMKA: V případě, že není madlo pevně uchyceno, uvolněte regulační matici (č.8) a ujistěte se, zda je madlo umístěno přesně kolmo mezi podlahou a stropem. Poté matici znovu utáhněte. Pokud je nutné další zajištění, je možné navrtat 2 dřevěné šrouby (č.10) do stropu jak je znázorněno na obr. č. 4. Další dva šrouby mohou být namontovány skrz nástavec (č.5) do podlahy.

Otočné držadlo nevykazuje žádná bezpečnostní rizika. Díky blokovacímu kolíčku lze držadlo nastavit do 8 možných pozic. Zatáhněte za kolíček umístěný pod držadlem a poté držadlem otočte do požadované pozice. Kolíček pusťte.

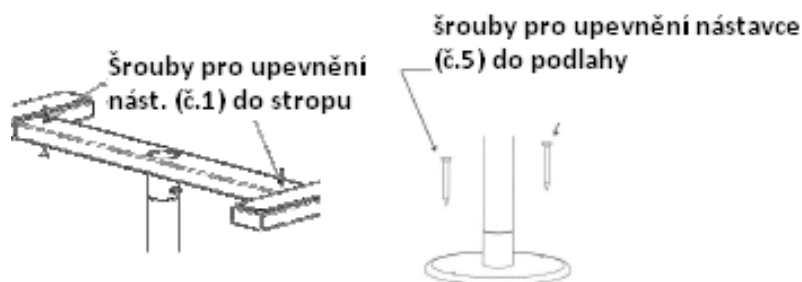

obr. č. 4

POZOR: Přečtěte si následující upozornění dříve, než začnete výrobek používat!

Bezpečnostní upozornění:

1. Pravidelně madlo kontrolujte na jeho pevnost.

Ujistěte se, aby bylo madlo instalováno k zemi v úhlu přesně 90°. Všechny gumové podložky musí být v kontaktu s podlahou a stropem.

Pro osoby, které vyžadují zvláštní péči, by mělo být madlo řádně bezpečnostně zajištěno. Jedná se převážně o osoby mentálně postižené, osoby pod vlivem léků, vysoké osoby či osoby s nadváhou, atd.

Při otáčení držadlem se vždy ujistěte, aby došlo k zacvaknutí madla do bezpečné polohy.

2. Trpíte-li vážnou chorobou či poraněním nebo berete-li léky, které mohou způsobit ztrátu rovnováhy, poraďte se prosím nejprve se svým lékařem, ještě předtím než začnete madlo používat! Neuvážené užívání může vést k poranění osoby.

3. Výrobek není určen k tomu, aby se osoba o madlo opírala celou svou vahou. Tento produkt slouží pouze jako pomůcka pro vstávání či sedání.

4. Veškeré pokyny uvedené v této příručce musí být plněny, aby byla zaručena pevnost a správné uchycení madla. Špatné používání tohoto výrobku může vést k poranění užívající osoby či jiným škodám.

5. Dávejte pozor, aby si s tímto výrobkem nehrály děti nebo se na madlo nevěšely.

6. Výrobce ani distributor nenesou jakoukoli zodpovědnost za vzniklé škody či vzniklá zranění z důvodu nesprávného používání či špatné instalace produktu.

Prosím, ještě předtím, než začnete výrobek používat, pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny uvedené v návodu k použití!

Váš dodavatel pro ČR:

SIVAK medical technology s. r. o.

Jana Masaryka 1713

500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327

www.sivak.cz

Střediska:

- Nádražní 82, 701 00 Ostrava tel.: 596 115 329
- ÚSP Hrabyně, 747 67 tel.: 553 775 002
- Na Topolce 1, 140 00 Praha tel.: 261 211 788

