

NAVLÉKAČ PONOŽEK A PUNČOCH

(Objednací číslo : FROTI 010)

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro snadnější ovládání uchopte oba konce najednou.
2. Shrňte rukama ponožku nebo punčochy tak, abyste měli palce rukou až ve špičce.
3. Srovnejte patu (-ty) se spodním okrajem navlékače a ponožku nebo punčochu přetáhněte přes okraj.
4. Pokračujte v natahování ponožky nebo punčocháčů až jsou celé na navlékači.
5. Pomocí provázků spusťte navlékač na zem před nohu tak, aby byla pata dole.
6. Natáhněte navlékač přes nohu tak, aby se špička nohy dotýkala špičky ponožky nebo punčoch. Drobnými pohyby prstů docílíte lepší manipulace s navlékačem. V této pozici netahejte za provázky.
7. Zvedněte patu od podlahy, propněte koleno a pomocí provázků přetáhněte ponožku nebo punčochy přes patu a vytáhněte vzhůru k lýtku.
8. Taháním za provázky vytáhněte navlékač z ponožky nebo punčochy.



Váš dodavatel pro ČR:

SIVAK medical technology s. r. o.
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327
www.sivak.cz

Střediska:

- Nádražní 82, 701 00 Ostrava tel.: 596 115 329
- ÚSP Hrabyně, 747 67 tel.: 553 775 002
- Na Topolce 1, 140 00 Praha tel.: 261 211 788