

ZVEDACÍ SEDÁK

Bezpečnostní opatření

Unikátní patentovaný design zvedacího sedáku pro vysokou bezpečnost. Tento zvedací sedák je vyroben tak, aby zaručoval co nejvyšší bezpečnost, tady jsou opatření, které musíte dodržet:

1. Ujistěte se, zda se při vstávání máte čeho držet
Tento zvedací sedák je určen pro použití na křeslech nebo židlích s područkami, což zaručuje stabilní sezení. Použití na měkkých židlích, pohovkách nebo gauči je obvykle O.K. Zvedák nedoporučujeme používat na vozíčkách, automobilech a kancelářských židlích bez možnosti uzamčení koleček
2. Vždy se ujistěte, že zvedák před použitím nemůže sklouznout na zem. V případě pochybností opřete židli o zeď nebo jinou pevnou plochu.
3. **Při ohýbání nebo zvedání nějakého předmětu nedávejte žádnou váhu na nohy, jinak se zvedák začne aktivovat.**




Stlaďte ohybem čalouněného sedáku.

Nastavení hmotnosti

1. Postavte zvedák na opačnou stranu od rukojetí.
2. Odlepte suché zipy okolo rukojeti k otevření zvedáku.
3. Stlaďte čalouněné části plochy sedadla tak, aby se sedák prohнул směrem ven a tím bude stlačen i píst. (Zvedák je vyroben tak, že to stlačení může být provedeno tisíckrát a zvedák nebude nijak poničen.)
4. Vyberte nastavení váhy. Píst umístěte mezi dvě drážky pro správné nastavení váhy. Ujistěte se, zda je píst bezpečně umístěn ve středu. Způsob sezení na zvedáku si každý uživatel zvolí sám dle jeho preferencí.



Vyberte vhodnou pozici pro uživatele a píst umístěte mezi zářžky.

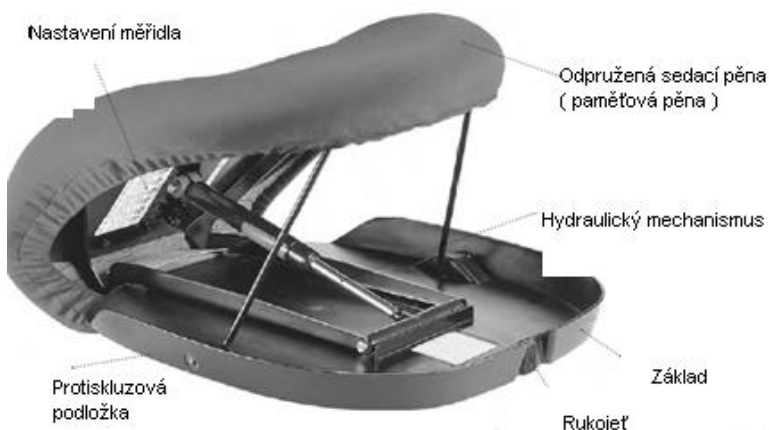

Posazení na zvedák

Pokud jste nastavili váhu, umístěte zvedák na židli, posadte se na rovnou část nahoru zvedáku. Zvedák s vámi bude pomalu a jemně klesat na vaši židli. (Pokus s vámi nebude zvedák klesat nastavte váhu na nižší)



Vstávání se zvedákem

Pokud jste připraveni na vstávání , pomalu začněte vstávat jako to děláte normálně, při naklonění dopředu s pomocí vašich rukou a nohou. Zvedák se vám přizpůsobí a pomalu a jemně vám pomůže vstát.




Vyměnitelné potahy

Zvedák je dodáván s pratelným, nepromokavým černým potahem.

Nasazení potahu:

1. Po nastavení váhy na zvedáku, ho položte na stůl s otevřeným koncem směrem od vás.
2. Nyní můžete natáhnout potah na zvedák.

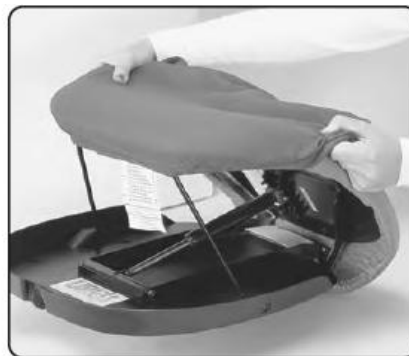

Všimněte si, že zadní díl potahu je širší než přední, doporučujeme na potahu nechat cedulku, tak abyste věděli, kde je přední a zadní díl.



Umístění na židli

Obvykle, zvedák by měl přesahovat přes židli jako je na obrázku. Na židlích, které jsou velmi měkké nebo hluboké raději umístěte zvedák dozadu. Při používání zvedáku mějte vždy obě ruce na opěrkách židle nebo na jiné vhodné podpoře.

Péče o váš zvedák

Plocha vašeho zvedáku je potažena speciální nehořlavým a vodě odolným potahem. Povrch polštáře můžete omýt houbičkou namočenou v saponátu nebo jiném čistícím prostředku. (**Nikdy nenamáčejte celý zvedák ve vodě.**)

Odnímatelný, vodě odolný potah můžete prát v pračce a sušit vzduchem.

Složení pro transport



Píst složte níže na spodek zvedáku.



Zvedák složte a upevněte suchým zipem, který je umístěn na držáku rukojeti.

Záruka dle zákona

Prosím berte na vědomí, že pokud se pokusíte zvedák si sami opravit, záruka se v tomto případě stává neplatná.

Váš dodavatel pro ČR:

SIVAK medical technology s. r. o.
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327
www.sivak.cz

Střediska:

- Nádražní 82, 701 00 Ostrava tel.: 596 115 329
- ÚSP Hrabyně, 747 67 tel.: 553 775 002
- Na Topolce 1, 140 00 Praha tel.: 261 211 788