

chodítko NITRO

uživatelský návod (český jazyk)



CZ Verze 11/2018



popis chodítka Nitro



1. rukojeť
2. výškově nastavitelná část rukojeti
3. zadní odrazka na rukojeti
4. brzdová páka
5. blokovací tlačítko rukojetí
6. zádová opěrka

7. sedátko
8. taška
9. přední kolečka
10. šroub pro nastavení brzdy
11. zadní kolečka
12. bezpečnostní pásek

představení


Pomůcka pro chůzi je vhodná pro použití jedním uživatelem s pohybovým omezením. Chodítko Nitro je vhodné pro použití uvnitř budov i mimo ně.

obsah balení

1. chodítko
2. taška
3. zadní opěrka
4. uživatelský návod

rozložení chodítka Nitro

Postavte chodítko Nitro na kolečka. Odejměte bezpečnostní pásek (obr. 1). Zatlačte obě trubky sedátka směrem dolů, dokud se nezablokují (obr. 2).

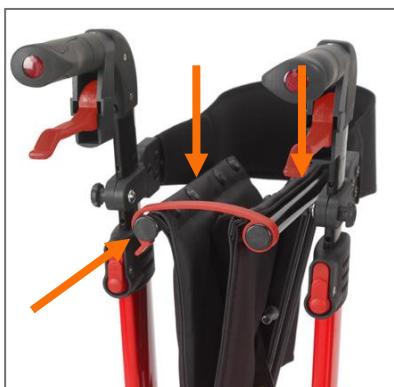


obr. 1



obr. 2

nastavení výšky

Stiskněte červené tlačítko, tím uvolníte rukojeti (obr. 3) a v tu samou dobu vytáhněte rukojeť nahoru. Jamile se rukojeť pohne, uvolněte tlačítko. Tím se výška automaticky uzamkne na další úrovni. Opakujte tento proces, dokud rukojeti nejsou v požadované výšce.

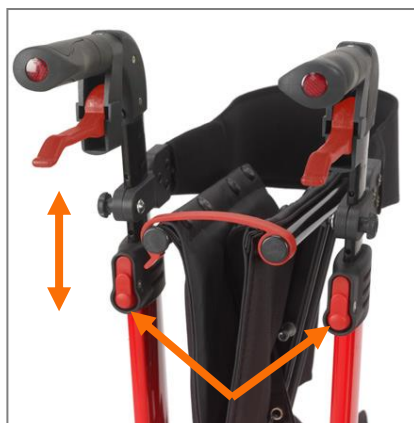

obr. 3

přípevnění tašky

Složte chodítko Nitro a vložte posuvný blok na tašce do vodící objímky na chodítku. Rozložte chodítko Nitro. (obr. 4-6)



obr. 4



obr. 5



obr. 6

brzdění/zamykání

Stiskněte obě brzdové páčky směrem nahoru, tím během pohybu začne chodítko Nitro brzdit. Vždy brzděte pomalu a rovnoměrně. (obr. 7)



obr. 7

Stisknutím obou brzdových páček směrem dolů, aktivujete brzdové zámky – chodítko Nitro musí stát, nesmí se pohybovat (obr. 8). Stisknutím brzdových páček směrem nahoru uvolníte brzdové zámky.



obr. 8

Účinky (síla) brzd mohou být ovlivněny opotřebováním koleček.

Pravidelně kontrolujte brzdy.

nastavení brzd

Pro nastavení síly brzd, nastavte brzdy stisknutím a posunutím krytu šroubu dolů (obr. 9) a poté otáčejte doleva či doprava (obr. 10).



obr. 9



obr. 10

posazení

Chodítko Nitro umístěte na rovný a pevný povrch. Uzamkněte brzdy (parkovací pozice). Chodítko Nitro musí stát rovně a nesmí prokluzovat. Posadte se rovně a neopírejte se dozadu/nezaklánějte se (obr. 11).



obr. 11

složení/přesun/uskladnění

Chcete-li chodítko Nitro složit, zatáhněte za sedadlo směrem nahoru (obr. 12). Chodítko Nitro může být nyní úplně složeno a zajištěn pomocí červeného bezpečnostního pásu (obr. 13 a 14).



obr. 12



obr. 13



obr. 14

bezpečnostní pokyny

- Používejte jej pouze jako pomůcku pro usnadnění chůze!
- Používejte jej pouze na rovném a pevném povrchu.
- Maximální nosnost je 300 lbs/136 kg.
- Pravidelně kontrolujte šrouby a další upevňovací prvky na chodítku Nitro a v případě jej dotáhněte.
- Tašku používejte pouze pro přepravu předmětů, nepřepĺňujte ji. Maximální nosnost je 11 lbs/5 kg.
- Nevystavujte výrobek teplotám nad 104°F/40°C po delší dobu, můžete tím způsobit zahřátí částí chodítka Nitro a možné popálení jejího uživatele.
- Ujistěte se, že chodítko Nitro je úplně otevřeno, sedátko je dole a sklopná lišta pod sedátkem je zajištěna v dolní poloze.
- Ujistěte se, že oba knoflíky jsou zcela utaženy a jsou ve stejné výšce. Zkontrolujte stabilitu chodítka Nitro před plným zatížením rukojetí.
- Před použitím chodítka zkontrolujte brzdy a brzdovou páku. Jsou-li kola zabrzděna, pojistka na zadních kolech by měla zabránit otáčení kol. Při uvolnění pojistky by se kola měla opět volně otáčet.
- Před posezením vždy chodítko zabrzďte. Nesedějte si, je-li chodítko na nerovném povrchu a naklání-li se.
- Pláště kol vyměňte při výrazném opotřebení nebo poškození.
- Sedí-li někdo na sedátku, chodítko netlačte. Jedná se o pomůcku pro usnadnění chůze, a proto nesmí být používán jako přepravní prostředek.

čištění/údržba

Chodítko Nitro pravidelně ručně čistěte. Používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

technická specifikace

REF: RTL10266/RTL 10266BLK

celková délka	70,5 cm
celková šířka	58.5 cm
výška rukojeti v nejvyšší poloze	97 cm
výška rukojeti v nejnižší poloze	85 cm
hloubka sedátka	20 cm
šířka sedátka	46 cm
sedátko ve výši od země	52 cm

průměr koleček:

zadní kolečka	20 cm
přední kolečka	25 cm

hmotnost výrobku	8 kg
maximální nosnost	135 kg

REF: 10266HD

celková délka	70,5 cm
celková šířka	58.5 cm
výška rukojeti v nejvyšší poloze	97 cm
výška rukojeti v nejnižší poloze	85 cm
hloubka sedátka	20 cm
šířka sedátka	46 cm

REF: RTL10266-H

celková délka	70,5 cm
celková šířka	58.5 cm
výška rukojeti v nejvyšší poloze	79 cm
výška rukojeti v nejnižší poloze	71 cm
hloubka sedátka	20 cm
šířka sedátka	46 cm
sedátko ve výši od země	46 cm

průměr koleček:

zadní kolečka	20 cm
přední kolečka	25 cm

hmotnost výrobku	8 kg
maximální nosnost	135 kg

REF: RTL10266-T

celková délka	70,5 cm
celková šířka	58.5 cm
výška rukojeti v nejvyšší poloze	104 cm
výška rukojeti v nejnižší poloze	91 cm
hloubka sedátka	20 cm
šířka sedátka	46 cm

sedátko ve výši od země	52 cm	sedátko ve výši od země	58 cm
průměr koleček:		průměr koleček:	
zadní kolečka	20 cm	zadní kolečka	20 cm
přední kolečka	25 cm	přední kolečka	25 cm
hmotnost výrobku	8 kg	hmotnost výrobku	8 kg
maximální nosnost	200 kg	maximální nosnost	135 kg

záruka

Na Váš zdravotnický výrobek od společnosti Drive je poskytnuta záruka po dobu dvou let od data nákupu (vztahuje se na závady na materiálech a zpracování).

Tento výrobek byl vytvořen v souladu s přísnými/náročnými požadavky. Výrobek byl před odesláním pečlivě zkontrolován. Tato záruka je důkazem důvěry společnosti Drive v materiály a zpracování.

V případě závady, na kterou se tato záruka vztahuje, bude buď vyměněn závadný díl, nebo celé chodítko.

Tato záruka se nevztahuje na závadu výrobku v důsledku nesprávného použití nebo nedbalosti nebo běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na součástky, jako jsou gumové doplňky, kolečka a držadla, které jsou předmětem běžného opotřebení a vyžadují pravidelnou výměnu.

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadujete plné záruční podmínky, obraťte se na svého prodejce.

Informace zde uvedené neovlivňují Vaše zákonná práva



Drive Medical Ltd

Ainley's Industrial Estate,

Elland, GB HX5 9JP

www.drivemedical.co.uk

kód dokumentu RTL10266_IFU, verze 8/2015