

EasySlide

SystemRoMedic™

*Bezpečné
a snadné*

*Prevence
dekubit*

EasySlide byla úplně první pomůcka pro přenos SystemRoMedic. Od roku 1984 se úspěšně používá v nemocnicích a pečovatelských domech po celém světě. Náš vlastní jedinečný kluzný materiál ULF (Ultra Low Friction) na vnitřním povrchu kluzné podložky snižuje tření a umožňuje pečovateli přenést uživatele prakticky na jakýkoli povrch s velmi jednoduchým úchopem rukou a s použitím minimální síly. Bez zbytečného zvedání poskytuje EasySlide jemný a pohodlný přenos jak pro uživatele, tak pro zdravotníky. Po všech těch letech je EasySlide stále perfektním a preferovaným pomocným zařízením pro bezpečné a snadné přenášení a pro polohování v posteli.

SIVAK®
medical technology s.r.o.



Pro přenosy vleže - EasySlide 1030



Pro polohování a přenosy vleže na zádech - EasySlide 1220

Snadné převody, jak pro uživatele a pro pečovatele.

EasySlide (190 x 60) se primárně používá pro přesuny vleže, například mezi lůžky a rentgenovými nebo operačními stoly, sprchovými vozíky, nosítky a podobně. EasySlide je ale také velmi účinnou pomůckou pro otáčení uživatelů na lůžku nebo na rentgenu či operačních stolech. Náš vlastní jedinečný kluzný materiál ULF (Ultra Low Friction) na vnitřním povrchu kluzné podložky snižuje tření a umožňuje pečovateli přenést uživatele prakticky na jakýkoli povrch s velmi jednoduchým úchopem rukou a s použitím minimální síly. Bez zbytečného zvedání poskytuje EasySlide jemný a pohodlný přenos jak pro uživatele, tak pro zdravotníky.

- Měkká, polstrovaná vnější strana zajišťuje pohodlné a jemné přesuny.
- Kluzný materiál ULF snižuje tření pod uživatelem.
- Ochranné a jednorázové kryty jsou k dispozici jako příslušenství.
- Odnímatelný ochranný kryt obsahující uhlíková vlákna snižuje statickou elektřinu.



Být schopen se otočit v posteli zlepšuje kvalitu života.

EasySlide (100 x 70) je určen především pro uživatele vyžadující pouze určitou péči, kteří se potřebují v posteli otáčet a pohybovat. Nejlépe funguje na hrubém povrchu. EasySlide snižuje tření na rameni a kyčli, což zase snižuje riziko otlaků. Díky těmto vlastnostem je EasySlide velmi šetrný k lidem s bolestí, ale i k ošetřujícímu personálu, čímž se vyhnete rizikům spojeným se zvedáním. EasySlide podporuje nezávislost a zlepšuje kvalitu života.

- Měkká, polstrovaná vnější strana zajišťuje pohodlné a jemné přesuny.
- Kluzný materiál ULF snižuje tření pod uživatelem.
- Ochranné a jednorázové kryty jsou k dispozici jako příslušenství.
- Odnímatelný ochranný kryt obsahující uhlíková vlákna snižuje statickou elektřinu.





Pro polohování - EasySlide 1430

Každý otlak, kterému se můžeme vyhnout, činí život jednodušší pro lidi upoutané na lůžko.

EasySlide (140 x 90) je určen pro uživatele s normální hmotností, kteří mají omezené až vážně snížené schopnosti účastnit se procesu otočení. Tito lidé jsou často trvale upoutáni na lůžko, a proto je důležité otlakům předcházet. EasySlide to zajišťuje snížením tření na ramenou, kyčlích a hlavy během otáčení se a tím, že usnadňuje otáčení uživatele tak často, jak je potřeba. EasySlide je velmi šetrný k lidem, kteří trpí bolestí. Kromě toho se snižuje zatížení pečovatelů díky snadnějším a méně těžkým přesunům.

EasySlide (200 x 90) má extra polstrování, aby se dále snížilo riziko otlaků. Polstrování rozděluje tlak na celé tělo a snižuje tlak, tření a riziko stříhu na zvláště zranitelná tlaková místa: ramena, boky, hlava a chodidla. Tato verze EasySlide je určena především pro uživatele, kteří jsou upoutáni na lůžko, s výrazně sníženými funkčními schopnostmi, často na jednotkách intenzivní péče. Snížením tření pod uživatelem je otáčení prováděno snadno a bezbolestně jak pro uživatele, tak pro ošetřovatele.

- Vnější strana je vyrobena z mikrovlákn, které je šetrné k tělu. To je důležité zejména pro uživatele upoutané na lůžko a pro osoby trpící bolestmi.
- Vnitřní strana je vyrobena z našeho jedinečného kluzného materiálu ULF (Ultra Low Friction), který snižuje tření pod uživatelem, a proto je k obrácení zapotřebí jen velmi malá síla.
- Jedná se o měkké, pohodlné a lehké materiály, které lze v posteli ponechat trvale.
- Popruhy pro upevnění posuvné podložky zaručují její správné uložení v lůžku.
- K prevenci proleženin přispívá také dobrá hygiena, a proto jsou jako příslušenství k dispozici ochranné a jednorázové kryty.
- Odnímatelný ochranný kryt obsahující uhlíková vlákna snižuje statickou elektřinu.
- K dispozici ve dvou délkách: 140 cm/56" a 200 cm/80".



Pro polohování - EasySlide 1470



Pro polohování a přesuny v sedě - EasySlide 2020

Kompaktní pomocník, který otevírá překvapující možnosti.

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) a (25 x 60) jsou vynikajícími pomůckami pro otáčení na lůžku, k posunutí uživatele výše v posteli, pro pomoc vstát z postele nebo pro přesun z postele na invalidní vozík. EasySlide je malý praktický pomocník, který podporuje aktivaci. EasySlide eliminuje zbytečné zvedání, čímž šetří záda i ramena pečovatele. EasySlide je také vynikající pomůcka pro pomoc těhotným ženám s bolestmi pánve a zad a lidem se sníženou funkční schopností samostatně se otočit v posteli.




- Měkká, polstrovaná vnější strana zajišťuje pohodlné a šetrné přenášení.
- Vnější tkanina je k dispozici ve dvou typech: polyester a mikrovlákn. Polyester je méně citlivý na nečistoty, zatímco mikrovlákn je pohodlnější, když uživatel na výrobku dlouho leží.
- Kluzný materiál ULF snižuje tření pod uživatelem.
- Ochranné a jednorázové kryty jsou k dispozici jako příslušenství pro EasySlide (50 x 60) a (50 x 70).
- Odnímatelný ochranný kryt obsahující uhlíková vlákna snižuje statickou elektřinu.
- K dispozici ve třech velikostech.



EasySlide pomáhá uživatelům posunout se v posteli výš.


REFERENCE

System EasySlide je k dispozici v několika různých verzích a velikostech pro různé situace přenosu a potřeby uživatelů. EasySlide je vyroben z mikrovlnáka (v letech 2010, 2011 a 2015 z polyesteru) s výplní z polyesteru a ULF (Ultra Low Friction), našeho vlastního, jedinečného kluzného materiálu. Většinu velikostí lze vybavit vyměnitelným ochranným potahem, který je vyroben z polyesteru a lze jej snadno čistit. Jednorázové plastové potahy zajišťují ještě lepší hygienu a méně praní. Celkově lze říci, že i po tolika letech je EasySlide stále dokonalým a preferovaným pomocným zařízením pro bezpečné a snadné přesuny a polohování na lůžku.

	Č. zboží	Výrobek	Popis
 <p>EasySlide 1030</p>	Pro přenosy vleže na zádech		
	1020	EasySlide	190 x 60 cm/76" x 24"
	1030	EasySlide (1020 + 1051)	190 x 60 cm/76 x 24", kompletní
	1051	Ochranný kryt	pro 1020, 1030
	1055	Kryt na jedno použití	pro 1020, 1030, 2 x 50 ks
 <p>EasySlide 1220 EasySlide 1430</p> <p>EasySlide 1470</p>	Pro polohování a přesuny vleže		
	1220	EasySlide	100 x 70 cm/40" x 28"
	1230	EasySlide (1220 + 1251)	100 x 70 cm/40" x 28", kompletní
	1420	EasySlide	140 x 90 cm/56" x 36", 2 popruhy na uchycení
	1430	EasySlide (1420 + 1451)	140 x 90 cm/56" x 36", 2 popruhy na uchycení, kompletní
	1470	EasySlide	200 x 90 cm/80" x 36", 4 popruhy na uchycení
	1480	EasySlide (1470 + 1481)	200 x 90 cm/80" x 36", 4 popruhy na uchycení, kompletní
	1251	Ochranný kryt	pro 1220, 1230, 2 x 90 ks
	1255	Kryt na jedno použití	pro 1420, 1430
	1451	Ochranný kryt	pro 1470, 1480
 <p>EasySlide 2015 EasySlide 2020</p>	Pro polohování a přesuny vsedě		
	2010	EasySlide	50 x 60 cm/19.7" x 23.6", polyester
	2020	EasySlide	50 x 60 cm/19.7" x 23.6", mikrovlnáko
	2030	EasySlide (2020 + 2051)	50 x 60 cm/19.7" x 23.6", mikrovlnáko, kompletní
	2011	EasySlide	50 x 70 cm/19.7" x 27.6", polyester
	2021	EasySlide	50 x 70 cm/19.7" x 27.6", mikrovlnáko
	2015	EasySlide	25 x 60 cm/9.8" x 23.6", polyester
	2051	Ochranný kryt	pro 2010, 2020, 2030
	2052	Ochranný kryt	pro 2011, 2021
	2055	Kryt na jedno použití	pro 2010, 2020, 2030, 100 ks



Příslušenství

	1085 Držák na stěnu	75 x 35 x 17 cm/30" x 14" x 6.8"
	Nástěnný držák umožňuje pohodlné ukládání ochranných krytů a jednorázových potahů.	

SystemRoMedic™ je kompletní řešení pro snadné přesuny. Koncepte zahrnuje čtyři oblasti výrobků, které splňují většinu potřeb v různých situacích při převozu.

Přesun mezi dvěma místy. **Polohování** v rámci jednoho místa.

Podpora mobility. Zvedání manuálně i mechanicky.



Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684
www.sivak.cz info@sivak.cz